



## 1. PROGRAMOWANIE POMPY

UMIEŚĆ  
ZESTAW



ZAMKNIJ  
POKRYWĘ



ZAPROGRAMUJ  
POMPĘ

WYCZYŚĆ PAMIĘĆ

ON/OFF

2 sek

CLR

wykasuj objętość

FILL SEET

WYBIERZ ŻYWIENIE

1

2

1

ŻYWIENIE CIĄGŁE

ON/OFF

ml/h

szybkość podaży

+ 400 ml/h  
- 1ml/h

START/STOP

2

USTAWIANIE DAWKI

ON/OFF

ml/h

szybkość podaży

+ 400 ml/h  
- 1ml/h

DOSE = VOL

objętość podaży

+ 4000 ml  
- 1ml

START/STOP

## 2. SPRAWDZANIE PARAMETRÓW

SZYBKOŚĆ PODAŻY

ml/h

OBJĘTOŚĆ PODAŻY

INFO



## 3. DAWKA ZOSTAŁA PODANA

END OF  
DOSE

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## PROBLEM

## ROZWIĄZANIE

NOT SET	START/STOP	WYCZYŚĆ CZUJNIKI	UMIEŚĆ ZESTAW	START/STOP		
PUSH START	START/STOP	ZAPROGRAMUJ POMPĘ	START/STOP			
END OF DOSE	START/STOP	INFO	CLR (3 sek)			
AIR	WYMIENŲ PUSTY POJEMNIK	WYCZYŚĆ CZUJNIKI	UMIEŚĆ ZESTAW	START/STOP		
BATT <small>POMPA NADAL PRACUJE</small>	NAŁADUJ POMPĘ	 (6 godz)				
E i F	OFF	SERWIS				
FILL SET	FILL SET					
OCC IN	START/STOP	WYJMIJ ZESTAW	PRZEŁU CZ POMPĘ	WYCZYŚĆ CZUJNIKI	UMIEŚĆ ZESTAW	START/STOP
OCC OUT	START/STOP	UDROŹNIJ POMPĘ	ZASSIJ PŁYN PRZEZ PORT	WYCZYŚĆ CZUJNIKI	UMIEŚĆ ZESTAW	START/STOP
OCC OUT	START/STOP	START/STOP	START/STOP	WYJMIJ ZESTAW	UMIEŚĆ ZESTAW	START/STOP
LOCK	ZABLOKOWANE PROGRAMOWANIE	ZMIANA USTWIEŃ				
ER01 – ER99	OFF	SPRAWDŲ POKRYWĘ	ON	lub	SERWIS	
BRAK SYMBOLU 	Podłącz pompę do innego gniazdka	lub	WYMIENŲ ŁĄCZE	lub	SERWIS	
PROG	SprawdŲ szybkość podaży					
DOOR	SprawdŲ zamknięcie pokrywy					